

PosfiT  
**HYBRID ARCH**

取扱説明書

保証書付

---

# お買い上げいただき 誠にありがとうございます

---

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、  
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、  
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

## 目次

---

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
セット内容と各部の名称	9
充電方法	10
ご使用前の準備	11
ご使用方法	12
リモコンの電池交換方法	15
収納・お手入れ・保管方法について	16
保管について	17
Q&A	18
保証とアフターサービスについて	21
無料修理規定	22
保証書	23

# 製品仕様と定格

販売名	ポスフィット ハイブリッドアーチ
型番	PFHA-10
電源	充電式 (リチウムイオン電池内蔵 95mAh/3.7V)
定格消費電力	0.9W
充電時間	約 45 分
電池持続時間	約 80 分 (1 モード 10 分を 8 回使用) ※ 1

材質	コントローラー：ABS 樹脂 サポーター：ナイロン、ポリウレタン、導電性 PU (ポリウレタン) リモコン：ABS 樹脂
寸法	約 W90×D210×H67mm (コントローラー含む)
重量	約 63g (片足 / コントローラー含む)
対応サイズ	約 22~25.5cm
タイマー	各モード 10 分 (連続使用時間) 自動電源 OFF
電源アダプター	定格入力：AC100-240V 50/60Hz 定格出力：DC5V 1A
セット内容	サポーター×2、コントローラー×2、リモコン (テスト電池 CR2032 付)、充電用ケーブル、電源アダプター、取扱説明書 (保証書付き)
生産国	中国

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※ 1 弊社推奨の使用 방법에準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

# 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。

安全にお使いいただくために色々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



**注意**

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

## 絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室  
での使用禁止



分解禁止

記号は、  
してはいけない  
こと(禁止)を  
表しています。





必ず守る

記号は、しなければ  
ならないこと(強制)  
を表しています。

# 警告

## 症状について

 <p>禁止</p>	<p><b>次の方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。</b></p> <hr/> <p>人工心肺などの生命維持用医療電子機器、心電計などの装着型医療電子機器、ペースメーカーなどの体内埋め込み型電子機器を使用している場合。</p> <hr/> <p>妊娠中や出産直後の方</p> <hr/> <p>血圧に異常がある方</p> <hr/> <p>上記以外で身体に異常を感じる時は、いかなる場合も使用しないでください。 事故、体調不良、症状を悪化させる原因になります。</p> <hr/> <p>自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方、17歳以下のお子様に使用させないでください。事故やけがの原因になります。</p>
 <p>必ず守る</p>	<p><b>次のような方は必ず医師とご相談の上で使用ください。事故や健康を害するおそれがあります。</b></p> <hr/> <p>悪性腫瘍のある方、心臓に障害のある方</p> <hr/> <p>急性疾患、有熱性疾患、伝染性疾患、感染性疾患の方</p> <hr/> <p>貧血症、糖尿病、血栓症、塞栓症、出血性疾患（血友病など）、結核性の病気を患っている方</p> <hr/> <p>発熱、急病、重症、皮膚病がある部位、ケロイド体質、高血圧、生理中、手術後、極度の疲労、安静が必要な状態の方</p> <hr/> <p>ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方</p> <hr/> <p>骨折、肉離れ、ねんざなど脚部に異常を感じている方</p>

# 警告

## 症状について（つづき）



必ず守る

アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体質で肌が敏感な方

事故や病気のため、体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる方

美容整形を行っている方

皮膚に異常や炎症（化粧品によるかぶれ、炎症、日焼けを含む）、かゆみ、切り傷、出血のおそれ、知覚障害などがある方

鎮痛剤、血糖降下剤、血圧降下剤を服用または注射されている方

飲酒中の方

その他、医療機関で治療中の方

上記以外に、身体に異常を感じている方

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。  
健康を害するおそれがあります。

## ご使用について



禁止

心臓の近く、キズ、ほくろ、静脈、口中、陰部など身体の敏感な場所に使用しないでください。

使う前には、必ずサポーターが破れていないか確認してください。破れがある場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

本製品は一般家庭用です。絶対に業務用として使用しないでください。




運転中、睡眠中に使用しないでください。

本製品以外の EMS 機器と併用しないでください。

本製品は室内用です。室外では使用しないでください。

# 警告

## ご使用について（つづき）

 <p>禁止</p>	<p>小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本製品で遊ばないようにしてください。</p> <hr/> <p>取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。</p> <hr/> <p>液体をこぼさないでください。</p> <hr/> <p>指輪・腕時計などの金属類、貴金属類のアクセサリ類を身につけた状態で本製品を使用しないでください。</p> <hr/> <p>本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・加熱や火中投下</li><li>・高温多湿環境でのご使用、充電、放置</li><li>・火気のある環境でのご使用、充電、放置</li><li>・ホコリやチリの多い環境での放置</li><li>・直射日光が当たる場所や炎天下の車中など高温になる場所でのご使用、充電</li></ul>
 <p>分解禁止</p>	<p>本製品の分解、改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。</p>
 <p>風呂、シャワー室での使用禁止</p>	<p>コントローラーやリモコンを絶対に水や液体などで濡らさないでください。浴室などの高温多湿の場所や、ほこりの多い場所で使用・保管しないでください。</p>

# 警告

## 電源について



禁止

本体の充電ポートの隙間に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。感電やけがの原因になります。

充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。  
また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。  
火災や感電の原因になります。

電源アダプターと充電用ケーブルが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電、ショート、火災の原因になります。

付属の電源アダプターと充電用ケーブル以外は使用しないでください。  
また、付属の電源アダプターと充電用ケーブルは本製品専用です。  
他の機器には絶対に使用しないでください。

火災や感電、故障の原因になります。

指定外の充電条件（指定以上の高い温度、指定以上の充電電圧や大きな電流、改造した充電器など）で充電すると、過充電され、電池が発熱、破裂、発火する原因となります。

お手入れの際は必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



# ⚠ 注意

## ご使用について



必ず守る

ご使用前に、必ず操作ボタンなど正常に動作するか確認してください。

10分以上の連続使用はしないでください。

1時間の休憩をはさんで、1日3回までの使用にとどめてください。

足裏以外には使用しないでください。

刺激により筋肉が動きますので、周囲に危険物がない状態でお使いください。

使用中は手で導電部を触らないでください。

強い刺激により、事故や身体のトラブルのおそれがあります。

導電部に金属を接触させないでください。

感電のおそれがあります。

電池を廃棄する時は正しく廃棄してください。

火に入れないでください。※詳しくはP.22を参照。

コントローラーを濡れた手で操作しないでください。

感電・故障・火災・やけどのおそれがあります。

コントローラーを水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。

コントローラーを落とさないようにしてください。故障の原因となります。

素材の特性上開封時に若干においがすることがありますが、異常ではありません。

本製品は肌に密着させる製品ですので、清潔にご使用ください。

(お手入れ方法についてはP16をご覧ください。)

不快感や痛みを感じるほどむやみに強くしたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となることがあります。慣れるまでは弱い強度でお試ください。


本製品を着用して、階段を上り下りする際は必ず手すりを使って行ってください。

# セット内容と各部の名称


開梱したら、ご使用になる前に以下のものがそろっているか確認してください。

## 本体

コントローラー X2

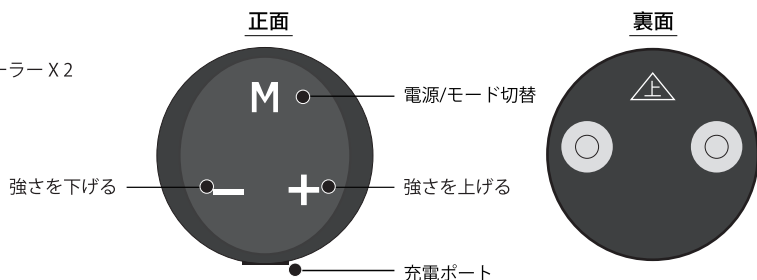

サポーター X2

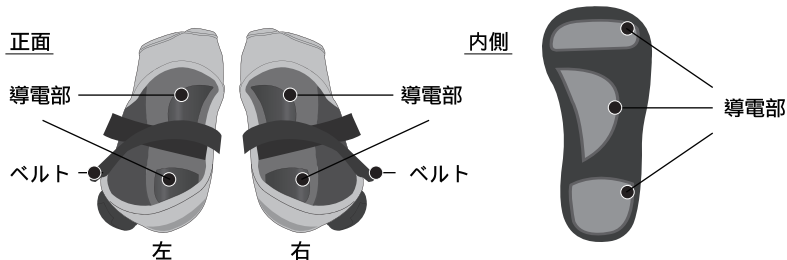


## リモコン

電源 OFF (長押し) / モード切替

強さを下げる

強さを上げる

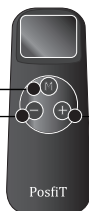


絶縁シートを抜き取る

※ご購入時、リモコンにテスト電池が入っています。絶縁シートを抜き取ってご使用ください。

## 付属品


充電用ケーブル

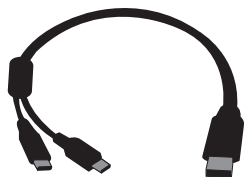

電源アダプター



取扱説明書  
(保証書付き)

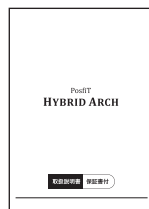


※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

# 充電方法

初めてご使用になる場合や、3ヶ月以上の長期間で使用にならなかった場合は必ず次の手順で電源アダプターを取り付け、充電を行ってからご使用ください。  
また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

- 1** 本体の充電ポートに、付属の充電用ケーブルを挿し込みます。  
※コントローラーは2つ同時に充電することが可能です。

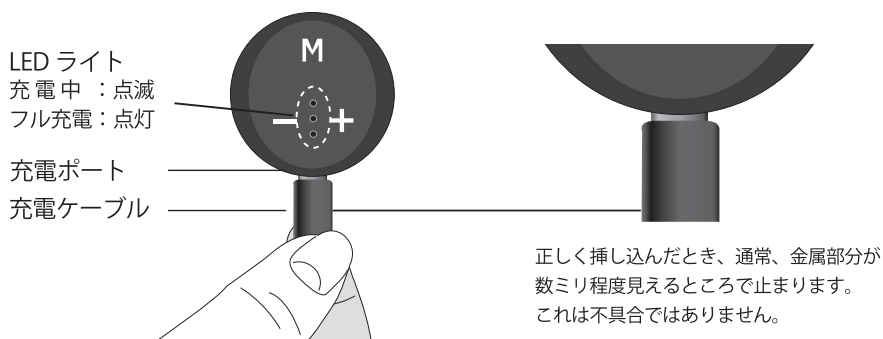

- 2** 電源アダプターを家庭用コンセントに挿し込みます。


※充電中、本体・充電アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。  
※フル充電されるまでの時間は約45分です。  
※充電中は本体を使用できません。

- 3** 充電が完了したら、電源アダプターの電源プラグをコンセントから外し、本体と電源アダプターから充電用ケーブルを取り外してください。

# ご使用前の準備

## サポーターを装着する

- 1 バンドを緩ませた状態で足を入れます。(必ず裸足の状態で装着してください。)
- 2 バンドを足の内側の穴に通します。
- 3 バンドを足の外側の穴に通します。
- 4 バンドを折り返して、つま先を合わせ、面ファスナーをしっかりと止めます。

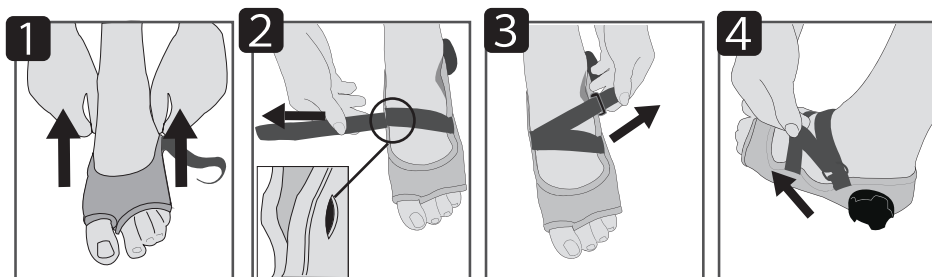


## コントローラーをセットする

コントローラーの電極端子とサポーターの電極端子を「カチッ」と音が出るまで、しっかりと装着してください。

※コントローラー裏面の「上」の表示が上側になるように装着してください。


※コントローラーがサポーターに装着されていない状態で、ボタン操作をしないでください。

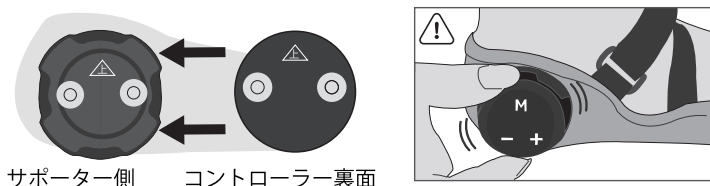

コントローラーをサポーターへ取り付けした後、グラグラと動く場合、装着ができておりません。取り付け後に、コントローラーが動かず、しっかりと装着されているか必ず確認してください。

# ご使用方法

## コントローラーでモード、レベルを調節する

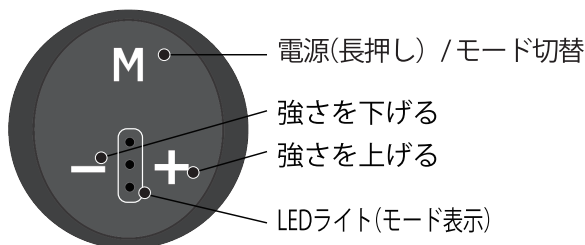

### 強さ15段階

最大・最低レベルに達すると「ピーピー」という音が鳴ります。

## 導電部に肌が接触した状態で電源を入れてください

- 1 コントローラーの ( **M** ) ボタンを約 2 秒長押しすると「ピッ」と音がなり電源が入ります。  
  
※一番上の LED ライトが点灯し、ながらモードが開始されます。  
※使い始め (購入直後や 3 カ月以上放置したとき) や使用中に動作が停止したときは、必ず充電してからお使いください。
- 2 ( **M** ) ボタンを押して、モードを選びます。  
  
※途中でモードボタンを押すと、出力強度が 1 の状態ではじめから開始されます。(タイマーもリセットされます。)  
※全モード約 10 分で自動的に停止します。
- 3 ( **+/-** ) ボタンを押して、強度を選びます。  
「+」ボタンを押し、刺激の強さを選びます。強さを下げたい時は、「-」ボタンを押します。  
( **+/-** ) ボタンを押した時「ピッ」と音が鳴ります。お好みの強さで使用してください。
- 4 途中で止めたい場合は、( **M** ) を約 2 秒長押しすると「ピッピッピッ」と音がなり電源が切れます。※すべての LED ライトが消灯します。
- 5 モードが終了すると「ピピピッ」という音がなり、自動で電源がオフになります。

※最初は弱い強度から使用し、無理のない強さを確認してから、強度をあげてください。


※ご使用中に「ピッピッピッ」と連続音が鳴り、一番上の LED ライトが点滅したら電池残量が少なくなっています。終了して充電を行ってください。

※電源が入っている状態で両側の導電部が肌に密着していない場合、「ピッピッ」と警告音が鳴り、出力強度が 1 に戻ります。さらに 1 分で電源が切れます。

※ご使用の際は必ず足を床につけた状態でご使用ください。

# ご使用方法

## リモコンでモード、レベルを調節する

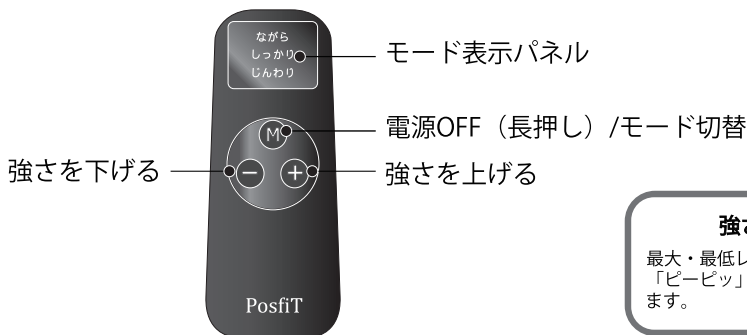

### 強さ15段階

最大・最低レベルに達すると「ピーピー」という音が鳴ります。



はじめて使う場合は、P.9を参照し、必ず絶縁シートを抜き取ってください。  
絶縁シートが入ったままの場合、電源が入りません。

※本体の電源が入っていないと、リモコンでの操作はできません。※リモコンから音は鳴りません。

※導電部に肌が接触した状態では強度設定はできません。

※ご使用前にモード表示パネルのキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。

## 導電部に肌が接触した状態で電源を入れてください

- 1 コントローラーの（ **M** ） ボタンを約2秒長押しすると、「ピッ」と音が鳴り電源が入ります。
- 2 リモコンの（ **M** ） ボタンを押して、モードを選びます。  
※リモコンはスリープモードとなっているため、初めに **M**・**+**・**-** のいずれかのボタンを押して、スリープモードを解除してください。しばらくリモコン操作しない場合、再度スリープモードとなります。その際もいずれかのボタンを押して、スリープモードを解除してください。  
※途中でモードボタンを押して、モードを変更すると強さが1の状態ではじめから開始されます。（タイマーもリセットされます。）  
※全モード約10分で自動的に停止します。
- 3 （ **+** / **-** ） ボタンを押して、強度を選びます。  
「**+**」ボタンを押し、刺激の強さを選びます。この時コントローラーから「ピッ」と音が鳴ります。  
強さを下げたい時は、「**-**」ボタンを押します。お好みの強さで使用してください。
- 4 途中で止めたい場合は、（ **M** ） ボタンを約2秒長押しするとコントローラーから「ピッピッピッ」と音がなり電源が切れます。※すべてのライトが消灯します。
- 5 モードが終了するとコントローラーから「ピピピッ」という音がなり、自動で電源がオフになります。

※最初は弱い強度から使用し、無理のない強度を確認してから、強度をあげていってください。

※リモコンで操作を行う際は、コントローラー部分に向けてボタンを押してください。


※コントローラーの電源が入っていないと、リモコンでの操作はできません。

※ご使用中にコントローラーから「ピッピッピッ」と連続音が鳴り、一番上のLEDライトが点滅したら電池残量が少なくなっています。終了して充電を行ってください。

※電源が入っている状態ですべての導電部が肌に密着していない場合、コントローラーから「ピッピッ」と警告音が鳴り、出力強度が1に戻ります。さらに1分後に自動で電源が切れます。

## モード切替

コントローラーの( **M** )ボタンを短押しするか、リモコンの( **M** )ボタンを短押しすることで、3つのモードを切替できます。

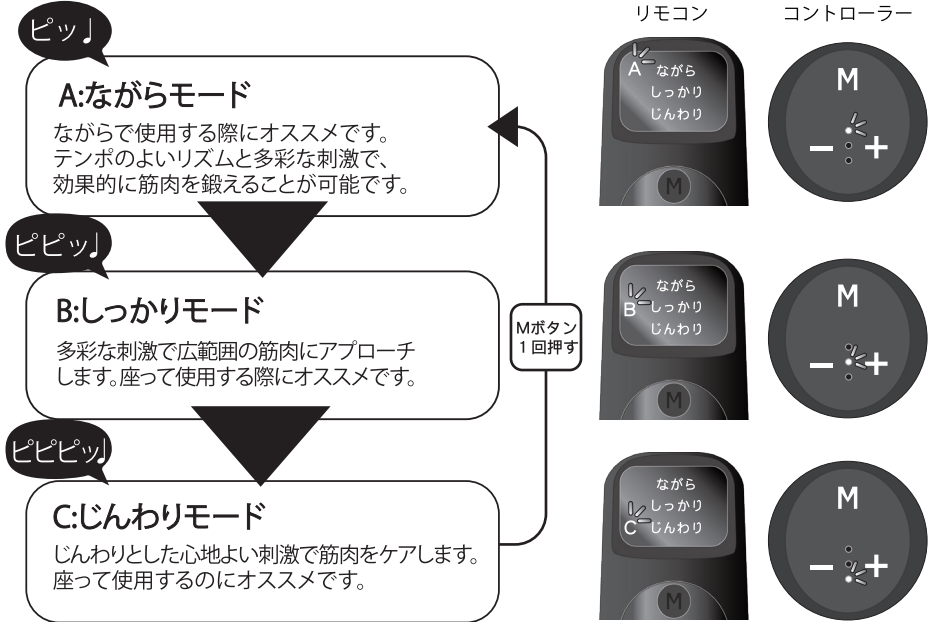


## おすすめトレーニング方法

### 良い効果を得るための3つのポイント

1. 日々の最大出力強度を記録していき、徐々に強度を上げていってください。
2. より強い出力強度はより良い結果につながる場合もありますが、不快なほど過度な刺激は避けてください。
3. 自動的に電源が切れるまで(10分間)ご使用ください。

# リモコンの電池交換方法

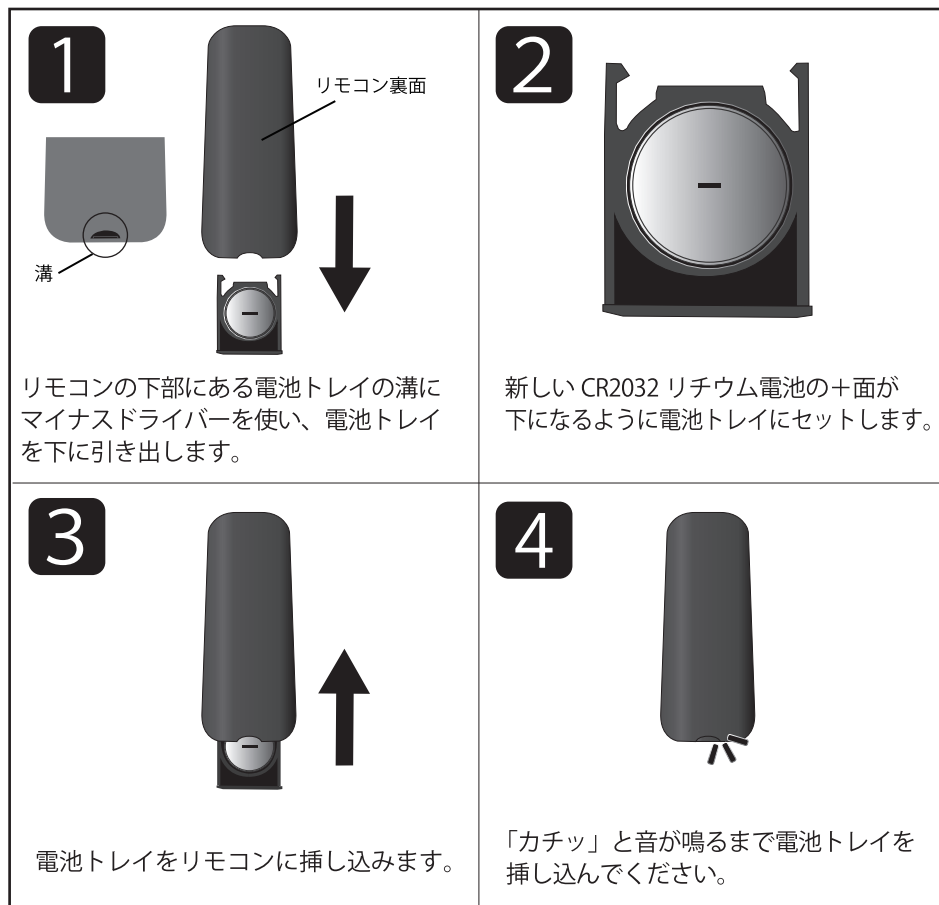

※初めにセットされているボタン電池はテスト電池になります。  
電池交換の際は、市販のCR2032のボタン電池をご使用ください。

※電池トレイを開閉する際は、爪で行わないでください。  
けがの原因になります。

※新しい電池の表面を触らない様、注意してセットしてください。



# 収納・お手入れ・保管方法について

## お手入れ方法

- 1.お手入れの前に、必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で抜き挿ししないでください。感電やけがの原因になります。
- 2.コントローラー・サポーター・リモコンの汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから  
コントローラー・サポーター・リモコンの表面汚れを丁寧に拭き取ってください。
- 3.シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ変色  
などの原因になります。
- 4.サポーターを洗う際には、必ず手洗いで洗濯してください。  
※必ずコントローラーを外してください。  
※直射日光を避けて、日かげで干してください。

## 保管方法

使用しないときは、本体の電源をオフにし、電源アダプターと充電用ケーブルを抜いて保管してください。

### 充電池について


- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命と考えられます。
- 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。  
また3ヶ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。  
長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

# 保管について

本製品は次のような場所に保管してください



水平で  
安定した場所

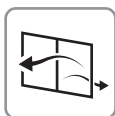

風通しの  
良い場所

気温 10～35℃  
湿度 20～80%

上記の気温と湿度の場所  
※充電時上記条件で行  
ってください。

本製品は次のような場所に保管しないでください

本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の  
当たる場所



ホコリや  
チリの  
多い場所



温度変化の  
激しい場所



湿度変化の  
激しい場所




火気のある  
場所



水に  
濡れやすい  
場所



揮発性物質  
のある場所

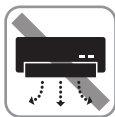

冷暖房機器に  
近い場所



振動のある  
場所



乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

# Q & A

## ●電源が入らない

- ・電源 (M) ボタンを長押し(2 秒間)しているか再度ご確認ください。
- ・電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。
- ・充電用ケーブルがささったままになっていないかご確認ください。充電しながらの使用はできません。

## ●警告音が止まらない/出力が上がらない/動かなくなった

- ・コントローラーの左右の電極端子とサポーターの左右の電極端子がしっかりと装着されているかご確認ください。
- ・10 分間動作した後に自動で電源が切れます。自動OFF ではないかご確認ください。
- ・電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。
- ・皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。
- ・肌が導電部に密着しているかご確認ください。また、必ず裸足で床に足をつけた状態でご使用ください。

## ●刺激を感じない

- ・肌が導電部に密着しているかご確認ください。肌に密着していないと「ピッピッ」と警告音が鳴り続けます。
- ・電池が消耗している可能性があります。充電を行い再度お試しください。
- ・強度設定が低い可能性があります。「+」ボタンを押して強度を上げてください。
- ・皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。

## ●使用した場所が赤くなった

- ・直ちに使用を止め、肌が正常な状態に戻るまで使用をお控えください。  
炎症がひかない場合は医師に相談してください。

## ●刺激が強すぎる/刺激が痛く感じる

- ・出力強度設定が強い可能性があります。「-」ボタンを押して強度を下げてください。
- ・導電部が肌に密着していない可能性があります。導電部と肌の上に隙間がないように使用してください。
- ・寒く、乾燥した環境で使用すると、肌が乾燥しやすくなり、電気刺激をピリピリと感じる原因となります。使用場所を温かい環境に変更し、再度お試しください。

## ●刺激が弱い

- ・電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。
- ・出力強度設定が低い可能性があります。「+」ボタンを押して強度を上げてください。
- ・電源が入っていない可能性があります。電源 (M) ボタンを長押し、電源が入っているかご確認ください。
- ・靴下やストッキングなどを着用したまま使用すると、通電しません。  
必ず裸足の状態でお試しください。
- ・皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。

# Q & A

## ●刺激が途中で止まってしまう

・肌に密着しているかご確認ください。安全のため、一定時間肌が導電部から離れた場合は、出力強度が1に戻ります。

## ●出力強度が上がらない

・ボタンの操作ミスの可能性があります。ボタンを短押ししているか再度ご確認ください。  
・電池の残量が無くなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。  
・すべての導電部に接触した状態でなければ、強度設定が出来ません。肌が電極部に密着しているかご確認ください。

## ●1日何回使ってもいいですか？

・使用回数は1日3回までです。連続使用は避け、1時間の間隔をあけてご使用ください。

## ●使用できる足のサイズは？

・約22cm～25.5cmです。

## ●靴下を履いた状態で使えますか？

・使えません。必ず裸足の状態でご使用ください。

## ●LEDライトが点滅する

・靴下やストッキングなどを履いた状態で使用している場合は、裸足の状態で使用してください。  
・足裏にクリームなどを塗っている場合は、拭き取ってから再度お試しください。  
・肌がしっかりと導電部に密着しているかご確認ください。

## ●使ってはいけないうちはありますか？

・発熱時  
・妊娠中や出産後 詳しくはP4をご確認ください。

## ●使用できない部位はありますか？

・本製品は足裏専用です。それ以外の部位に使用すると、事故やけがの原因になります。

## ●浴室で使用できますか？

・本体は防水仕様ではありません。浴室での使用は故障の原因となりますのでお控えください。

## ●睡眠中に使用できますか？

・睡眠中は使用しないでください。

## ●家族で使用する場合、衛生面は大丈夫ですか？

・複数の方が使用した場合の衛生面を保証しておりません。  
複数の方で使用するのをお控えください。

## ●洗濯機で洗えますか？

・サポーターを洗う際には、洗濯機は使用せず、必ず手洗いで洗濯してください。  
※必ずコントローラーを外してください。

## ●日常生活でもサポーターをはいても大丈夫ですか？

・問題ありません。ただし、サポーターのみご使用の場合はコントローラーをはずしてご使用ください。  
故障や事故の原因となります。

## ●足先が寒いのでくつ下をはいて使用してもいいですか？

・本製品は必ず裸足でご使用ください。どうしても寒い場合は本製品の上から大きめのくつ下などを着用の上、ご使用ください。

# Q & A

---

- 充電しても使用可能時間が極端に短くなった**
  - ・充電時間が充分でない可能性があります。
  - ・フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。
- 妊娠中や出産直後は使用できますか？**
  - ・使用しないでください。産後・授乳中の方は、かかりつけの医師にご相談ください。
- 使用中、焦げ臭い**
  - ・機械の故障が考えられます。ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 左右の動きが違う、強さが違う**
  - ・左右の足の筋肉量・水分量の違いによって刺激の強さが異なる場合がございます。  
※故障ではございませんので、そのまま使用しても問題ありません。  
左右の動きが違う場合は、電源を入れなおして再度お試しください。
- リモコンの操作が出来なくなった**
  - ・コントローラーとリモコンの再接続をお願いします。下記の手順で操作してください。
    - 1.コントローラーの電源を入れる
    - 2.10秒以内にコントローラーの「-」ボタンを6回連続短押しする
    - 3.コントローラーのLEDが点灯し、ブザーが「ピピピ」と20秒間連続音が鳴る
    - 4.20秒以内にリモコンのいずれかのボタンを2回押す  
※20秒の間に操作がない場合、自動OFFとなります。
    - 5.LEDが消え、ブザー音が停止し、コントローラーの電源がOFFになったら接続完了※お届け時はすでに接続されていますので、設定する必要はありません

# 保証とアフターサービスについて

使い方、お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

## 保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売店・購入日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間となります。この保証はコントローラー、リモコンのみ適応し、その他の付属品には適応されません。

## 修理を依頼する前に

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

## 保証期間内の修理について

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

## 保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店へご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間について

この製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造終了から3年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

# 無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書きにしたがって使用した状態で保証期間内に故障した場合には無償修理とさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ商品と本誌をご提示いただきお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
  - ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
  - ・不当な修理や改造による故障や損傷
  - ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
  - ・一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障および損傷
  - ・サポーターの使用後の汚れ・ほつれ・破れ・色落ち
  - ・保証書のご提示がない場合
  - ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合(通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください)
  - ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

## 廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地自治体にお問い合わせください。電源アダプターも、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



# 保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無料修理を行う事をお約束するものです。お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店へ修理を依頼してください。

商品名	ポスフィット ハイブリッドアーチ
型番	PFHA-10
保証期間	お買い上げ日から1年間（付属品は除きます）
製造番号	
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 〒 お名前 様 電話（ ） -
※販売店	販売店名・住所 電話（ ） -

※販売店様へ ※印欄は必ず記入してお客様にお渡しください。

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴァスタジオ  
〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-17-11  
TEL：0120-998-830

01KO4522