



Hips stretch air belt *EX*



取扱説明書

保管用

保証書付

お買い上げいただき 誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

| | |
|-----------------------------|----|
| 製品仕様と定格 | 2 |
| 安全上のご注意 | 3 |
| セット内容と各部の名称 | 7 |
| お使いになる前に | 8 |
| ご使用方法 | 9 |
| エクササイズモード・ストレッチモードの準備 | 11 |
| おすすめの姿勢（エクササイズモード・ストレッチモード） | 12 |
| 美脚モードの準備 | 13 |
| おすすめの姿勢（美脚モード） | 14 |
| お手入れ方法と注意事項 | 15 |
| 保管について | 16 |
| 故障かな？と思ったら | 17 |
| Q&A | 18 |
| 保証とアフターサービスについて | 19 |
| 保証規定 | 20 |
| 保証書 | 21 |

製品仕様と定格

| | |
|--------|--|
| 商品名 | 骨盤ストレッチエアーベルトEX |
| 型番 | PSA-100EX |
| 電源 | 充電式（リチウムイオン電池内蔵 2,400mAh/3.7V） |
| 定格消費電力 | 最大8W |
| 充電時間 | 約220分 (※充電時間は付属の充電用ケーブルで充電した際の目安です) |
| 電池持続時間 | エア＋温感：約90分（1モード10分を9回使用）※1 エアのみ：約140分（1モード10分を14回使用）※1 |
| 材質 | 【コントローラー】ABS樹脂＋PC（ポリカーボネート） 【ベルト】ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、その他 |
| 寸法 | 約W1,200×D53×H253mm |
| 重量 | 本体：約575g |
| 対応サイズ | 巻き付け周囲：約65～110cm |
| タイマー | 10分（モード連続使用時間） |
| セット内容 | 本体、充電用ケーブル、取扱説明書（保証書付） |
| 生産国 | 中国 |

△ 製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※1 弊社推奨の使用方法に準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。
- ・ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。
- ・安全にお使いいただくために色々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室での使用・保管禁止



分解禁止



濡れ手で禁止

記号は、
してはいけない
こと(禁止)を
表しています。



必ず守る

記号は、しなければ
ならないこと(強制)
を表しています。

安全上のご注意 (症状について)

警告



禁止

● 次のような方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ① 医師からマッサージを禁じられている方
例：血栓 [そく(塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 [皮下組織の炎症を含む] など
- ② 次のような医療機器用電子機器をお使いの方
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
- ③ 骨盤周り (おしり) や太ももに重度の血行障害のある方
- ④ 骨折・骨粗しょう症など骨に異常のある方
- ⑤ 知覚障害や意思表示のできない方
- ⑥ 飲酒中、生理中、妊娠中、出産直後、授乳中の方
- ⑦ 安静を必要としている方や体調がすぐれない方
- ⑧ 毛細血管拡張を起こしている方
- ⑨ 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方、17歳以下のお子様

※ 上記以外で身体に異常を感じる時は、いかなる場合も使用しないでください。
事故、体調不良、症状を悪化させる原因になります。



必ず守る





● 次のような方は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

- ① 国で定められている指定難病を患っている方
- ② 悪性腫瘍のある方、心臓に障害のある方
- ③ 急性疾患の方
- ④ 現在腰痛の方や、過去に腰や背中、骨盤、股関節を痛めたことのある方
変形性関節炎、リウマチ、痛風の方
- ⑤ 有熱性疾患、感染症疾患、伝染病疾患の方
- ⑥ 骨粗しょう症の方、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性とう(疼) 痛性疾患の方
- ⑦ 重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方
- ⑧ 体温38℃以上 (有熱期) の方
(例：急性炎症症状 [けん(倦) 怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき])
- ⑨ けんしょう(腱鞘) 炎の方
- ⑩ 呼吸器に障害がある方
- ⑪ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害のある方
- ⑫ 脳神経に異常を感じている方 (てんかんなど)
- ⑬ 子宮内膜症や子宮筋腫のある方
- ⑭ 美容整形を行っている方
- ⑮ 介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活ができない方、その他医師の治療を受けている方や上記以外にたくに身体の異常を感じている方


※ 使用前や使用中、肌や身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、
医師にご相談ください

安全上のご注意 (ご使用・保管について)

警告


| | |
|--|---|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">●ご使用前に、必ず布地が破れていないか確認してください。破れがある場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。事故やけがの原因になります。●骨盤周り（おしり）、太もものケア以外の目的で使わないでください。事故やけがの原因になります。●本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。事故のおそれがあります。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●運転中、睡眠中に使用しないでください。●同一部位での複数回使用は1時間以上の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。●長時間の使用は筋肉や神経に必要な以上の刺激になるので、逆効果やけがの原因になります。●取扱説明書に記載の使用方法以外で使用しないでください。●万が一、異常な音、におい、煙が出たとき、内部に異物が混入したときは電源をオフにし、お買い上げの販売店まで連絡してください。 |
|  分解禁止 | <ul style="list-style-type: none">●本製品の分解・改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。 |
|  風呂、シャワー室での使用・保管禁止 | <ul style="list-style-type: none">●お風呂場など、高温多湿の場所やホコリの多い場所で使用・保管しないでください。けがや故障の原因となります。 |
|  濡れ手で禁止 | <ul style="list-style-type: none">●本製品（付属品含む）を濡れた手で操作しないでください。●本製品（付属品含む）を水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります。 |

注意



| | |
|---|---|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">●不快感や痛みを感じるほどむやみに強くしたり、無理に温度を上げたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となることがあります。慣れるまでは、弱い設定でお試してください。●可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり、包んだりしないでください。●本製品を使用しながらの運動はしないでください。けがの原因になります。●本製品をお子様・ペットの手の届くところに置かないでください。けがややけどのおそれがあります。●小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本製品で遊ばないようにしてください。●火に入れないでください。※詳しくはP.16を参照。●食後すぐの使用はお控ください。●使用中にめまい、足の痙攣、息切れなどの身体の異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、医師と相談してください。●同時に2人以上で使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。●エアバッグに故意に力を加えて無理やり止めないでください。事故やけがのおそれがあります。 |
|---|---|

安全上のご注意 (ご使用・保管について)

注意

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">● 本製品は清潔にご使用ください。お手入れ方法についてはP.15をご覧ください。● ケア部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。● ご使用前に、必ず操作ボタンなどが正常に動作するか確認してください。● 使用中に体勢を変える際は十分にご注意ください。● 医療行為には使用できません。● 初めてご使用の際はレベル1で使用し、使用中身体に異常がないか十分注意してください。初めからエアの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。● 皮膚が弱い方はエアバッグ部分が背中、腰、お尻、脚などの皮膚に直接触れないようにしてください。摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。 |
| 必ず守る | |

(充電電池・充電用ケーブル・充電について)

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">● 付属の充電用ケーブル以外に接続しないでください。火災や発熱、破裂、故障の原因となります。● 本体の充電ポートの間に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。● 付属の充電用ケーブルを他の機器には絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。● お手入れの際は必ず充電用ケーブルを本体から抜いてください。 |
| 必ず守る | |
|  | <ul style="list-style-type: none">● 充電用ケーブルが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。● 充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。● 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。発火・火災のおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">① 加熱や火中投下② 高温多湿環境でのご使用、充電、放置③ 火気のある環境でのご使用、充電、放置④ ホコリやチリの多い環境での放置⑤ 直射日光が当たる場所や炎天下の車中など高温になる場所でのご使用、充電、放置● もれた液に触らないでください。本製品内部や電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。 |
| 禁止 | |

廃棄する場合は

本体には、リチウムイオン電池が内蔵されています。
廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。
条例の詳しい内容は、各地自治体にお問い合わせください。
充電用ケーブルも、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



Li-ion

セット内容と各部の名称

コントローラー




ベルト（正面）



※コントローラーは
ベルトから外せません。

ベルト（裏面）

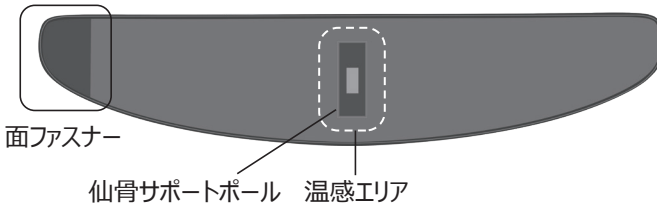

充電用ケーブル



取扱説明書 (保証書付)



お使いになる前に

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で電源アダプターを取り付け、充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

1 コントローラーの充電ポートに、付属の充電用ケーブルを挿し込む。

※必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。

※必ず端子部分を持って抜き挿ししてください。



2 電源アダプターを家庭用コンセントに挿し込む。



- ・電源アダプターは付属していません。
市販の電源アダプターをご使用ください。(DC5.0V/1.0A推奨)
- ・急速充電のアダプターには対応していません。
製品の性能に影響があるおそれがあるので、ご使用はお控えください。
- ・パソコンのUSBポート等からの充電はお止めください。

3 コントローラーのLEDランプが緑色に点滅し、充電が開始される。



- ・充電中にご使用できません。
- ・満充電後は充電用ケーブルを本体から抜いてください。
- ・満充電されるまでの時間は約220分です。
- ・充電中、本体・電源アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。


ご使用方法

- 1 コントローラーの電源ボタンを約2秒長押しすると、「ピー」と音がなり電源が入ります。

※電源を入れると、エクササイズモードが自動で開始されます。
※LEDランプが緑色に点灯します。

- 2 モードボタンを押して、使用したいモードを選びます。


※途中でモードボタンを押すと、動作強度とタイマーがリセットされ、レベル1の状態ではじめから開始されます。
※全モード約10分で自動的に停止します。

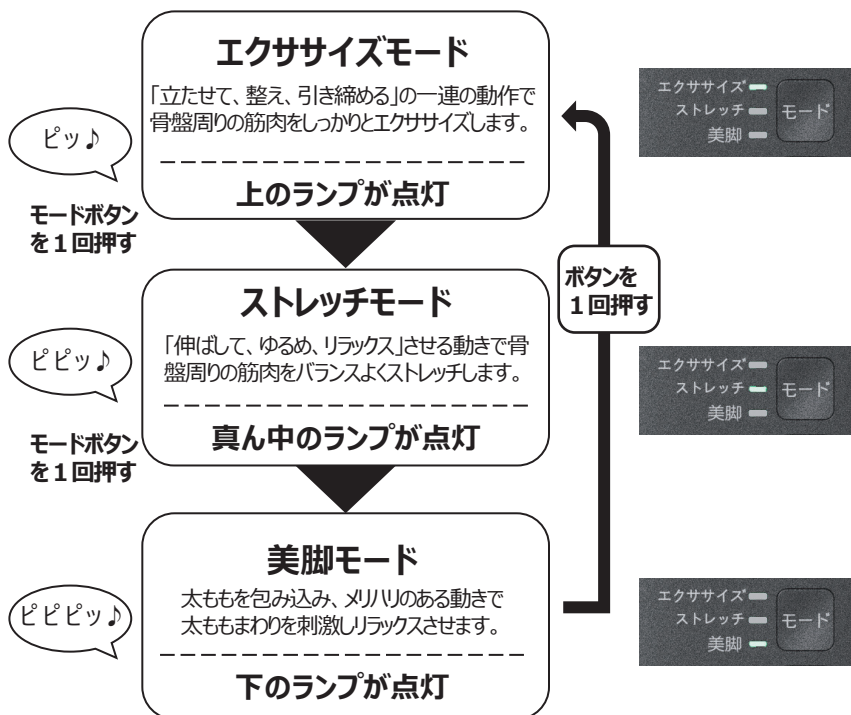

ご使用中に「ピピピピッ」と連続音が鳴り、モード表示ランプが点滅したら、充電残量が少なくなっています。使用をやめ充電を行ってから再度ご使用ください。

ご使用方法

3 強度ボタン+、-を押して、強度を選びます。

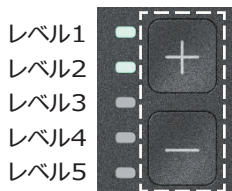


レベルを上げたいときは、(+) ボタンを短押しします。
レベルを下げたいときは、(-) ボタンを短押しします。

・出力レベルは1(弱)~5(強)の5段階です。
最小・最大レベルに達すると「ピピッ」という
連続音がなります。

※最初はレベル 1 から使用し、無理のないレベルを確認してから、強度を上げていってください。

4 お好みの温感レベルを短押しで選びます。

温感ボタンを短押しすることにより、温かさが切り替わります。

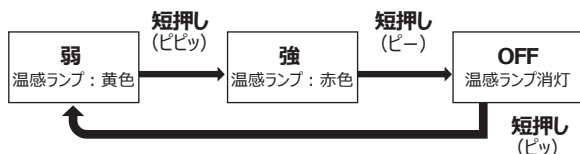

- ・熱すぎる場合は、ただちにOFFにしてください。
- ・温感を使用する際は、背もたれにもたれたり、仰向けで寝転んで使うなどの体重がかかるような体勢で使用することはおやめください。低温やけどのおそれがあります。


5 プログラムは約10分間続き、「ピー」と音がなりその後自動で電源が切れます。

途中で止めたい場合は、コントローラーの電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。

エクササイズモード・ストレッチモードの準備


1 足を閉じて、ベルトの端を持ち、おしりにあてる

- ・コントローラーが右側にくるようにベルトを持ってください。
- ・身体が前かがみになったり、脚が開かないよう姿勢に気をつけてください。
- ・ベルトを落とさないようしっかりと持ってください。

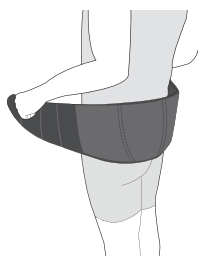


2 ベルトを装着する位置と高さを合わせる

- ・おしりの中心に仙骨サポートボールを合わせます。
 - ・高さは、ベルトの上端が、腰の引っ張りに被る位置が目安となります。
- ※個人差がありますので、体感の良い高さで微調整を行ってください。

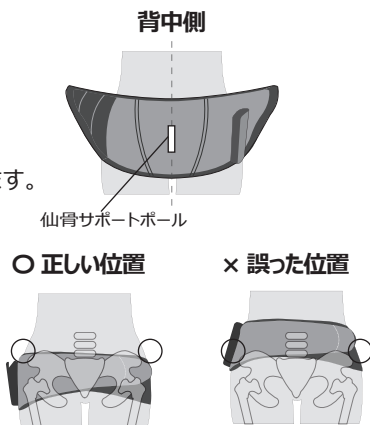

3 ベルトをとめる


- ・ベルトの左右を引っ張り、隙間が出来ないように身体の前側で面ファスナーをしっかりとめます。
- ※ベルトを巻いた後は、面ファスナーをしっかりと押さえてください。
- ・おなかを圧迫しないようにご調整ください。

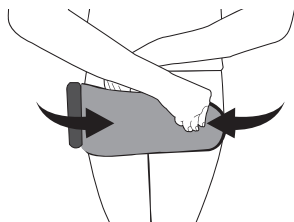

おすすめの姿勢 (エクササイズモード・ストレッチモード)


立ちながら使うときは

- 1 ソファなど安定したものにつかまり立ちする
- 2 背筋を伸ばして脚を閉じる

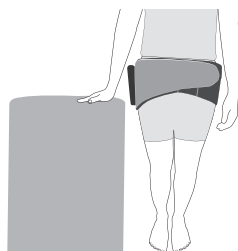

座りながら使うときは



- 1 ソファなどに座り、おしりでベルトが
つぶされないように少し上にずらす
エアバッグがおしりにつぶされないように調整してください。
※ベルトを巻いた状態で勢いよく座らないでください。
- 2 面ファスナーが外れていないか確認する
・座るときに面ファスナーが外れたり、
ゆるんだりする場合があります。その際は、
一度電源をOFFにし、再度巻き直してください。
※脚を組んだり広げないようにご注意ください。
・おなかを圧迫しないような位置にご調整ください。

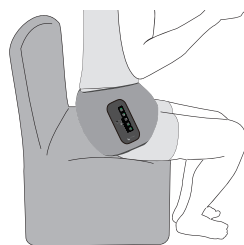

※1

寝ころびながら使うときは

- 1 頭や身体をぶつけるものがないか確認して寝転ぶ
・コントローラーを身体とベッドなどの間に
挟まないでください。
- 2 面ファスナーが外れてないか確認する
・寝ころぶときに面ファスナーが外れたり、
ゆるんだりする場合があります。その際は、
一度電源をOFFにし、再度巻き直してください。

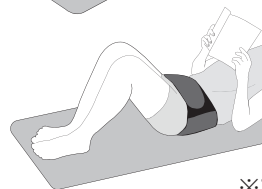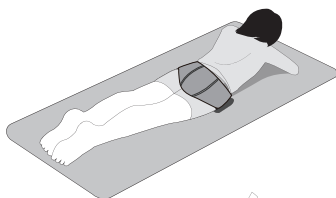

※2




- ・かたい床や椅子は避け、柔らかい椅子やソファの上でご使用ください。
- ・面ファスナーが衣服やベッド、ソファにつかないようにご注意ください。

※1※2 温感を使用するときは図のように仙骨サポートポールに体重がかかりやすい姿勢はおやめください。低温やけどのおそれがあります。

美脚モードの準備


1 ソファーなどに座り、ベルトの端を持ち、太ももの下から通す

- ・コントローラーが右手側にくるようにベルトを持ってください。
- ・脚が開かないよう姿勢に気をつけてください。
- ・コントローラーを圧迫しないようにしてください。

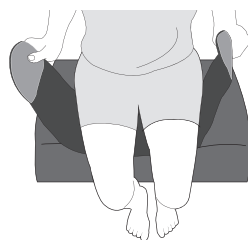


2 位置を合わせる

- ・太ももの後ろの隙間に仙骨サポートポールを合わせます。
- ・太ももの付け根に沿って、ベルトをあてます。
エアバッグがおしりにつぶされないように調整してください。

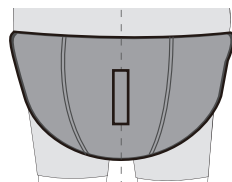

3 ベルトをとめる


- ・ベルトがゆるくないか（太ももとの隙間がないか）を確認し、面ファスナーでしっかりとめます。
- ※ベルトを巻いた後は面ファスナーをしっかりと押さえてください。
- ※ベルトと太ももの間に隙間が空いてしまう場合は、足の隙間にタオル等を入れてご使用ください。

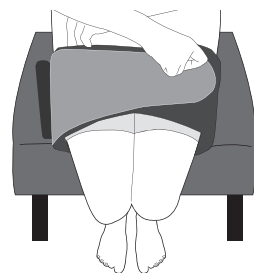

おすすめの姿勢（美脚モード）

立ちながら使うときは


- 1 ソファなど安定したものにつかまり立ちする
- 2 背筋を伸ばして脚を閉じる

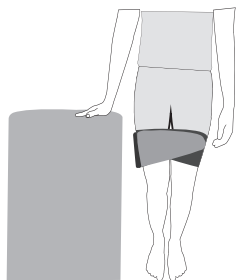

座りながら使うときは

- 1 ソファなどに座り、おしりでベルトが
つぶされないように少し上にずらす
エアバッグがおしりにつぶされないように調整してください。
※ベルトを巻いた状態で勢いよく座らないでください。

- 1 面ファスナーが外れてないか確認する
・座るときに面ファスナーが外れたり、
ゆるんだりする場合があります。その際は、
一度電源をOFFにし、再度巻き直してください。
・おなかを圧迫しないような位置にご調整ください。

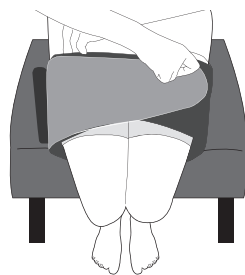


※3

寝ころびながら使うときは

- 1 頭や身体をぶつけるものがないか確認して寝転ぶ
・コントローラーを身体とベッドなどの間に挟まないでください。

- 1 面ファスナーが外れてないか確認する
・寝ころぶときに面ファスナーが外れたり、
ゆるんだりする場合があります。その際は、
一度電源をOFFにし、再度巻き直してください。

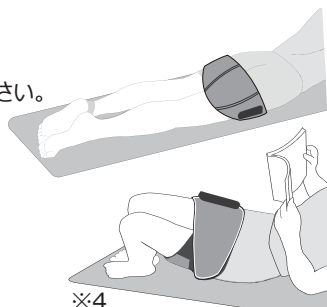

※4




※かたい床や椅子は避け、柔らかい椅子やソファの上でご使用ください。
※面ファスナーが衣服やベッド、ソファにつかないようにご注意ください。

※3※4 温感を使用するときは図のように仙骨サポートポールに体重がかかりやすい姿勢はおやめください。低温やけどのおそれがあります。

お手入れ方法と注意事項

本体の収納方法

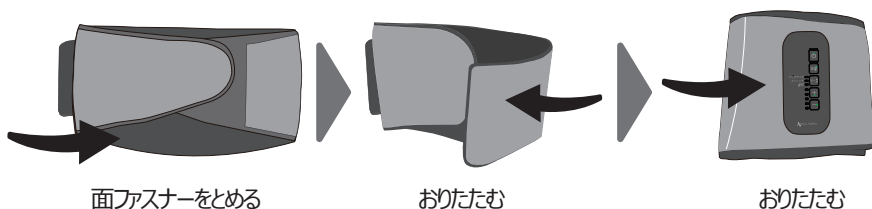

お手入れ方法

1. お手入れの前に、必ず充電用ケーブルをコントローラーをから抜いてください。
※ぬれた手で抜き挿ししないでください。感電やけがの原因になります。
また、生地が破れていないかご確認ください。
2. コントローラー・ベルトの汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってからコントローラー・ベルトの表面汚れを丁寧に拭き取ってください。
3. シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
故障や部品の割れ変色などの原因になります。

※絶対に水洗いしないでください。防水性ではありません。

※使用後、面ファスナーをはがす際に無理に引っ張るようにはがすことはおやめください。

保管方法

使用しないときは、本体の電源をオフにし、充電用ケーブルを抜いて保管してください。

充電池について


- 充電池は消耗品です。（保証対象外）
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命と考えられます。
- 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 長期間使用しないときは、本体を満充電にしてから保管してください。
また3ヶ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しなかった場合、充電ができなくなることがあります。

保管について

本品は次のような場所に保管してください



水平で
安定した場所

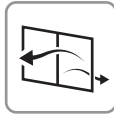

風通しの
良い場所

気温 10 ~ 35℃
湿度 20 ~ 80%
上記の気温と湿度の場所
※充電時も上記条件で
行ってください。

本品は次のような場所に保管しないでください

本機器は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の
当たる場所



ホコリや
チリの
多い場所



温度変化の
激しい場所



湿度変化の
激しい場所




火気のある
場所



水に
濡れやすい
場所



揮発性物質
のある場所

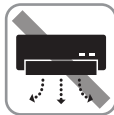

冷暖房機器に
近い場所



振動のある
場所

注意

乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

故障かな？と思ったら

| | |
|----------------------|--|
| 電源が入らない | <ul style="list-style-type: none"> ・電源ボタンを長押し(2秒間)しているか再度ご確認ください。 ・電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。 ・充電用ケーブルがささったままになっていないかご確認ください。充電しながらの使用はできません。 |
| 途中で電源が落ちしまう | <ul style="list-style-type: none"> ・10分動作した後に自動で電源が切れます。自動OFFではないかご確認ください。 ・電池の残量がなくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。 |
| エクササイズが強すぎる／弱すぎる | <ul style="list-style-type: none"> ・ベルトの巻きかたによって、エクササイズ感を調節できます。エクササイズ感が強い→ゆるめに巻いてください。エクササイズ感が弱い→隙間なく巻いてください。 |
| 使用中にコントローラーが熱くなる | <ul style="list-style-type: none"> ・故障ではございませんので、熱が冷めるまでしばらく電源をお切りください。※触れられないくらい熱くなっている場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。 |
| 充電しても使用可能時間が極端に短くなった | <ul style="list-style-type: none"> ・長期間(1ヶ月以上)使用していない場合、充電残量が減っている可能性があります。 ・充電時間が充分でない可能性があります。再度充電してお試しください。 ・満充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。 ・保管・使用環境により、お届け時と比べて使用可能回数に変化する可能性があります。 |
| 温かさを感じない | <ul style="list-style-type: none"> ・温感がOFFになっている可能性があります。温感機能ボタンを短押ししてください。 ・温度が低い場合は、温感機能ボタンを短押ししてレベルを調整してください。 |
| 熱すぎる | <ul style="list-style-type: none"> ・温度が高い場合は、温感機能ボタンを短押ししてレベルを下げてください。 ・弱でも熱すぎる場合は、ただちに温感ボタンを2回短押しして、OFFにしてください。 ・温感の箇所(仙骨サポートポール)に圧がかかっていると熱く感じる場合がございます。 ※仰向けでの使用や背もたれに寄りかかっている使用はおやめください。 |

Q&A

| | |
|--------------------------------|--|
| 使ってはいけな いときはありますか？ | <ul style="list-style-type: none"> ・発熱時 ・妊娠中 ・生理中 ・出産直後や授乳中 詳しくはP.4をご確認ください。 |
| 使用した場所が赤くな った | ・ただちに使用を止め、肌が正常な状態に戻るまで使用をお控えください。炎症がひかない場合は医師に相談してください。 |
| 使用できない部位は ありますか？ | ・本商品は骨盤まわり（おしり）、太もも専用です。それ以外の部位に使用すると、事故やけがの原因になります。 |
| 睡眠中に使用できま すか？ | ・睡眠中は使用しないでください。 |
| 浴室で使用できま すか？ | ・本製品は防水性ではありません。使用しないでください。 |
| 家族で使用する場 合、衛生面は大丈夫 ですか？ | ・複数の方が使用した場合の衛生面を保証しておりません。複数の方で使用するのをお控えください。 |
| 使用時間、使用頻 度の目安はありますか？ | ・モードを設定してから約10分後に自動で電源がオフになります。1時間以上の休憩をはさんで、同一部位1日2回までのご使用にとどめてください。 |
| 使用できる骨盤ま わりや、太ももの サイズは？ | ・使用可能な巻き付け周囲：約65cm～110cm |
| エクササイズ中、 ベルトがずれた感 じがします。 | ・衣類が動きベルトがずれたように感じる場合がありますが、異常ではありません。 |
| 肌に面ファスナー があたって、違和 感を感じる。 | ・薄手のハンカチなどをあてて、使用してください。 |
| ベルトの空気が抜 けないです。 | ・エアバッグに残っている空気が多いと、空気が抜けるのに時間がかかる場合があります。空気が自然に抜けるまでしばらくお待ちください。 |
| 異音がる | <ul style="list-style-type: none"> ・バリバリ音：エアバッグに空気が入るとき、面ファスナーが引っ張られる音です。 ・ウォーン音 ウィーン音：モーターの音です。 ・シュー音 スー音：エアの排気音です。構造上発生する音です。異常ではありません。 |
| 使用中、焦げ臭 い | ・機械の故障が考えられます。ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| 洋服の上から使 えますか？ | ・使えます。 |

保証とアフターサービスについて

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページになりますので必ず「販売店・購入日」等をご記入の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間となります。この保証はコントローラーのみに適応されます。
※なお、お客様都合による紛失、破損、故障等は保証対象外となります。

アフターサービスを依頼する前に

アフターサービスを依頼する前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、それでも異常がある場合はお買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

故障した場合の連絡について

お買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

保証期間経過後の対応について

お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。ご希望により有償にて代替品交換対応とさせていただきます。

保証部品の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、3年を目安に保管しておりますので、原則として本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は3年です。なお、期限経過後であっても、対応可能な場合もありますので、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償対応とさせていただきます。無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ本製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有償になります。
 - ・本製品に付属の充電用ケーブル以外を使用した場合
 - ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - ・不当な修理や改造による故障や損傷
 - ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
 - ・一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
 - ・ベルトの使用後の破れ、千切れ、ほつれ、汚れ、使用による摩耗などの損傷、故障
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷
 - ・車両、船舶などで配送した場合の故障および損傷
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合（通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください）
 - ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - ・正規販売店以外（リサイクルショップ・ネットオークション等）で購入した場合
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の対応についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へお問い合わせください。

保証期間経過後の対応や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償対応を行う事をお約束するものです。お買上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店もしくはお客様相談室へ依頼してください。

| | |
|--------|-------------------------|
| 商品名 | 骨盤ストレッチエアベルトEX |
| 型番 | PSA-100EX |
| 保証期間 | お買上げ日から1年間（コントローラーのみ） |
| お買上げ日 | 年 月 日 |
| ※お客様情報 | ご住所 〒 お名前 電話（ ） - |
| ※販売店 | 販売店名 電話（ ） - |

※印欄は必ずご記入ください

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴァスタジオ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11

TEL：0120-998-830 10：00-16：00（土日祝休）

